



## کاشف یار

### کیت تشخیص سریع مواد مخدر و روانگردان

**کاربرد: تشخیص مواد مخدر و روانگردان**

**چگونگی عملکرد:** وجود مواد مخدر و روانگردان را می‌توان با تغییر رنگ کیت تشخیص داد. بسته به نوع دارو یا مواد مخدر رنگهای مختلفی کمتر از ۳۰ ثانیه صورت می‌گیرد.

**شرایط نگهداری:** عمر مفید کیت بر روی بسته بندی درج شده است. کیت‌ها دور از نور مستقیم خورشید قرار داده و در محدوده دمایی ۲۰- الی ۵۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. میزان دقت: این روش دارای حد تشخیص پایین در حدود کمتر از ۳ میلی گرم است.

**هشدارها:**

۱- لطفاً راهنمای استفاده از کیت را قبل از استفاده به دقت مطالعه نمایید.

۲- کیت دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

۳- از تماس مستقیم با پوست خودداری شود.

۴- در صورت تماس با چشم، پوست یا لباس، فوری با آب سرد فراوان شستشو داده شود.

۵- پس از مصرف و انجام آزمایش، محتويات کیت را دور بریزید.

**محتويات تست**

هر بسته حاوی ۱۰ عدد شیشه آمپول پلمپ شده- آمپول شکن / عدد قاشقک / راهنمای استفاده

#### روش انجام تست



بعد از استفاده، آمپول را داخل سطل زباله می‌اندازید.



رنگ معروف را با خطوط رنگی چاپ شده راهنمای بسته بندی مقایسه نمایید.



با استفاده از قاشقک مواد مشکوک را وارد آمپول کنید.



قسمت بالای آمپول را بین انگشت شست و شاره بگیرید و با آمپول شکن از قسمت بالای آن جدا کنید.

